

# LIFELOC FC5 快速離口測試酒測器

## 組件圖



- 1.LCD 顯示：顯示測試順序和結果，自動背光的白天/黑夜能見度。
- 2.功能按鈕：調整測試模式。
- 3.電源按鈕：打開或關閉本機，5 分鐘後會自動關機。
- 4.執行按鈕：執行功能或觸發手動測試
- 5.採樣錐：呼吸應該指向錐體，以確保適當的測試。
- 6.保護皮套：覆蓋並保護整個機器。
- 7.電池蓋：容納 4 個 AA 電池最多 4700 次測試。

## 操作入門

- 1.短暫按下電源，打開 FC5 電源按鈕。  
該儀器將開機，然後顯示 POS / NEG 測試模式。

- 2.要切換測試模式，請按功能按鈕。

### 進行自動測試

- 1.將採樣錐放置在約 4 英寸或 10 厘米處。
- 2.指示受試者穩穩地朝向錐吹氣。
- 3.機器將自動感應觸發，直到聽到“逼”聲響停止吹氣。
- 4.閱讀結果。
- 5.結果將在屏幕上停留 30 秒或直到你按下功能鍵。